

GET STARTED COMMENCER | ERSTE SCHRITTE | EMPEZAR



go.withings.com

1 Download the Withings app

Téléchargez l'application Withings
Laden Sie die Withings-App herunter
Descarga la aplicación Withings



2 Create an account

Créez votre compte
Erstellen Sie ein Konto
Crear una cuenta



3 Go to 'Devices' and follow installation instructions

Rendez-vous dans "Appareils" et procédez à l'installation
Gehen Sie zu „Geräte“ und folgen Sie bitte der Installationsanleitung
Vaya a "Dispositivos" y siga instrucciones de instalación



YOUR BPM VISION

VOTRE BPM VISION | IHR BPM VISION | SU BPM VISION

Travel case

Boîte de transport
Reisekoffer
Maletín de transporte

Soft inflatable cuff

Brassard gonflable souple
Weiche aufblasbare Manschette
Manguito inflable blando



LCD display

Ecran LCD
LCD-Display
Pantalla LCD

Contextual buttons

Boutons contextuels
Kontextabhängige Tasten
Botones contextuales


Power button

Bouton d'allumage
Power-Taste
Botón de encendido

1. BEFORE MEASUREMENT

AVANT LA MESURE | VOR DER MESSUNG
ANTES DE LA MEDICIÓN

30min before

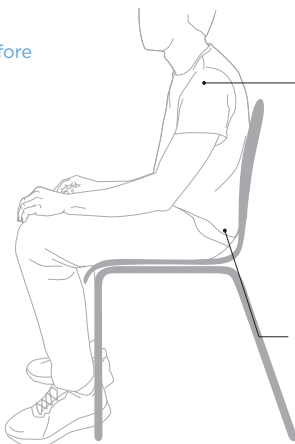

Take 5 min to relax


Prenez 5 minutes pour vous détendre
Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit zum Entspannen
Tómese 5 minutos para relajarse

Back supported

Dos supporté
Rücken gestützt
Espalda apoyada

2. DURING MEASUREMENT

PENDANT LA MESURE | WÄHREND DER MESSUNG
DURANTE LA MEDICIÓN

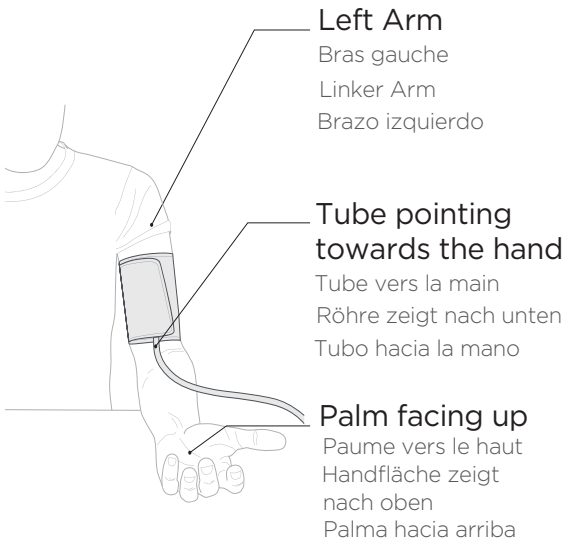

Left Arm

Bras gauche
Linker Arm
Brazo izquierdo

Tube pointing towards the hand

Tube vers la main
Röhre zeigt nach unten
Tubo hacia la mano

Palm facing up

Paume vers le haut
Handfläche zeigt nach oben
Palma hacia arriba



WITHINGS | BPM VISION

DISCOVER OUR DEVICES

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS CONNECTÉS | ENTDECKEN SIE UNSERE GESUNDHEITSGERÄTE
| DESCUBRA NUESTROS DISPOSITIVOS



withings.com

AW_QSG_WPM08_ALL_INT_B
January 2025

WELCOME TO THE COMMUNITY
BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ | WILLKOMMEN IN DER COMMUNITY
| BIENVENIDO A LA COMUNIDAD